



# Job aid for STANDARD Q HIV/ Syphilis Combo Rapid Test

STANDARD Q HIV/SYPHILIS Combo စစ်ဆေးကိရိယာ အသုံးပြုမီ အညွှန်းစာရွက်ကို သေချာစွာဖတ်ရှုပါ။

စစ်ဆေးကိရိယာအိတ်၏အနောက်ဖက်တွင်ပါသော သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်ရက်စွဲကို စစ်ဆေးပါ။

စစ်ဆေးကိရိယာများကို ရေခဲသေတ္တာ အခဲခန်း (-20°C) တွင်မသိမ်းဆည်းရပါ။

စစ်ဆေးကိရိယာနှင့် သွေးနမူနာများအား ရေခဲသေတ္တာ (2-8 °C) တွင် သိမ်းဆည်းထားပါက စစ်ဆေးမှုမပြုလုပ်မီ (30) မိနစ်ခန့် ကြိုတင်၍ အခန်းအပူချိန် (15-30 °C / 59-86 °F) ရောက်အောင် ထုတ်ထားပါ။

စစ်ဆေးကိရိယာအထုပ်ထဲရှိ Silica gel အရောင်သည် အဝါရောင် ဖြစ်ရမည်။ အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေပါက ထိုစစ်ဆေးကိရိယာအား အသုံးမပြုရပါ။

စစ်ဆေးကိရိယာအထုပ်သည် ပေါက်ပြဲနေပါက အထဲမှ စစ်ဆေးကိရိယာကို အသုံးမပြုရပါ။



## (၁) စစ်ဆေးကိရိယာဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း


(က) လက်ထိပ်သွေးဖောက်ပြီး Capillary tube ဖြင့် ရယူထားသော သွေး (20 µl) ကို သွေးနမူနာ ထည့်ရမည့်နေရာသို့ ထည့်ပါ။

(သို့မဟုတ်)

ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်လျှင်

- Whole Blood ဖြစ်ပါက (20 µl)
- Serum (သို့မဟုတ်) Plasma သွေးရည်ကြည် ဖြစ်ပါက (10µl)

ကို micropipette ဖြင့်ယူ၍ သွေးနမူနာထည့်ရမည့် နေရာသို့ထည့်ပါ။

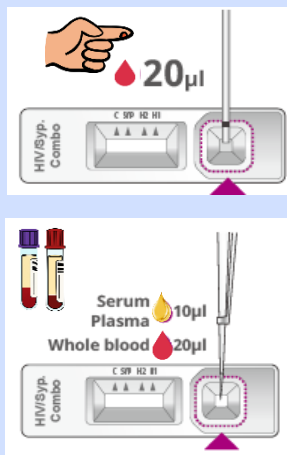

(ခ) ဆေးရည် (၃) စက် ကို သွေးနမူနာထည့်သည့် နေရာသို့ ထည့်ပါ။



ဆေးရည်ထည့်သည့်အခါ ပုလင်းထိပ်ကို စစ်ဆေးကိရိယာနှင့် မထိမိစေရန် သတိပြုပါ။

## (၂) အဖြေဖတ်ခြင်း

အချိန်မှတ်ကိရိယာဖြင့် အချိန်စမှတ်ပြီး အဖြေကို (၁၅) မိနစ်နှင့် (၂၀) မိနစ် အတွင်း ဖတ်ရမည်။ (၂၀) မိနစ် ကျော်ပြီးနောက် အဖြေဖတ်ရပါ။



Test result	Example	Description
Non-reactive		C တစ်နေရာတည်းတွင်သာ အရောင်မျဉ်းပေါ်သည်။
Reactive	HIV-1 Reactive 	C နှင့် H1 နေရာများတွင် အရောင်မျဉ်းများပေါ်သည်။ C, H2 နှင့် H1 နေရာများတွင် အရောင်မျဉ်းများပေါ်ပြီး H1 နေရာရှိမျဉ်းသည် H2 နေရာရှိမျဉ်းထက် အရောင်ထင်းသည်။
	HIV-2 Reactive 	C နှင့် H2 နေရာများတွင် အရောင်မျဉ်းများပေါ်သည်။ C, H2 နှင့် H1 နေရာများတွင် အရောင်မျဉ်းများပေါ်ပြီး H2 နေရာရှိမျဉ်းသည် H1 နေရာရှိမျဉ်းထက် အရောင်ထင်းသည်။
	Syphilis Reactive 	C နှင့် SYP နေရာများတွင် အရောင်မျဉ်းများပေါ်သည်။ (SYP နေရာတွင်ပေါ်သောမျဉ်းသည်အရောင်မှိန်သည်ဖြစ်စေ၊အရောင်ထင်းသည်ဖြစ်စေဓာတ်ပြုမှုရှိသည်ဟု ယူဆသည်။)
	HIV-1 & Syphilis Reactive 	C, SYP နှင့် H1 နေရာများတွင် အရောင်မျဉ်းများပေါ်သည်။ C, SYP, H2 နှင့် H1 နေရာများတွင် အရောင်မျဉ်းများပေါ်ပြီး H1 နေရာရှိမျဉ်းသည် H2 နေရာရှိမျဉ်းထက် အရောင်ထင်းသည်။
	HIV-2 & Syphilis Reactive 	C, SYP နှင့် H2 နေရာများတွင် အရောင်မျဉ်းများပေါ်သည်။ C, SYP, H2 နှင့် H1 နေရာများတွင် အရောင်မျဉ်းများပေါ်ပြီး H2 နေရာရှိမျဉ်းသည် H1 နေရာရှိမျဉ်းထက် အရောင်ထင်းသည်။
Invalid		C နေရာနှင့် SYP   H2   H1 နေရာအားလုံးတို့တွင် အရောင်မျဉ်း လုံးဝမပေါ်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ C နေရာတွင် အရောင်မျဉ်း မပေါ် ပဲ SYP နေရာတွင်ဖြစ်စေ၊ H2 နေရာတွင်ဖြစ်စေ၊ H1 နေရာတွင်ဖြစ်စေ အရောင်မျဉ်းပေါ်နေပါက စံမမှီသော အဖြေအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး စစ်ဆေးကိရိယာအသစ်ဖြင့် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်မံစစ်ဆေးရမည်။